

Navina Classic - Productinformatie

Beschrijving van het product

Transanaal irrigatiesysteem met handmatige controle-unit.

Houdbaarheid en aantal keren gebruik

Alle onderdelen van het Navina Irrigatiesysteem hebben een houdbaarheid van 3,5 jaar, met uitzondering van de Navina katheters en de Navina conus, die een houdbaarheid van 2 jaar hebben. Wanneer Navina onderdelen in sets zijn verpakt, is het onderdeel met de kortste houdbaarheid bepalend voor de houdbaarheid van de set.

Navina katheters en conussen zijn voor eenmalig gebruik. De watercontainer kan 15 keer worden gebruikt en de Navina Classic controle-unit en de slangenset kunnen 100 keer worden gebruikt.

Materiaalsamenstelling

Kathetermateriaal: styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS)/polypropyleen (PP) met een hydrofiële polyvinylpyrrolidon (PVP)-coating.

Primair verpakkingsmateriaal: zakje van PE/nylon.

Secundair verpakkingsmateriaal: karton en golfkarton.

Beoogd gebruik

Navina Systems is bedoeld voor darmspoelen door water via een rectale conus in het onderste deel van de darm in te brengen.

Indicaties voor het gebruik

Navina Systems is geïndiceerd als hulpmiddel voor volwassenen en voor kinderen vanaf 3 jaar die lijden aan fecale incontinentie, chronische constipatie en/of een moeizame stoelgang hebben. Door water in het onderste deel van de darm in te brengen, wordt de peristaltiek in de darmen gestimuleerd om de inhoud van het laatste deel van de darm en de endeldarm te ledigen.

Contra-indicaties

Gebruik Navina Systems **NIET** als bij u sprake is van één of meer van de volgende aandoeningen:

- Bekende anale of colorectale stenose.
- Een actieve ontsteking aan de darm.
- Acute diverticulitis.
- Colorectale kanker.
- Ischemische colitis.
- Anale of colorectale chirurgie die minder dan drie maanden geleden heeft plaatsgevonden.
- Een endoscopische polypectomie die minder dan 4 weken geleden heeft plaatsgevonden.

In deze lijst staat mogelijk niet alles vermeld. Uw zorgverlener zal altijd rekening houden met de persoonsgebonden factoren van een gebruiker.



Navina Classic System

Referentie	Type	Specificaties
6900565	Navina Classic systeem Regular (normaal)	1 Navina Classic controle-unit
6900765	Navina Classic systeem Small (klein)	1 watercontainer
6901765	Navina Classic systeem conus	1 slangenset 2 rectaalkatheters 1 Navina opbergkoffer 1 set accessoires
6900665	Navina Classic systeem Reguliere navulling	1 Navina Classic controle-unit
6900865	Navina Classic systeem Kleine navulling	1 watercontainer
6901865	Navina Classic systeem Conus navulling	1 slangenset 2 rectaalkatheters
6900300	Navina verbruiksset Regular (normaal)	1 watercontainer
6900400	Navina verbruiksset Small (klein)	15 rectaalkatheters
6901600	Navina verbruiksset conus	
6894000	Navina katheterset Regular (normaal)	10 rectaalkatheters
6894300	Navina katheterset Small (klein)	
6901100	Navina slangenset	1 katheterslang 1 watercontainerslang
6901200	Navina accessoires	2 grijpringen (1 verticaal, 1 horizontaal) 1 nekkoord 1 positioneringsband 1 Navina Smart positioneringsclip
6901365	Navina Classic controle-unit	1 Navina Classic controle-unit

Navina™ Classic

